



Instrucciones del Chaleco de Venosa Central

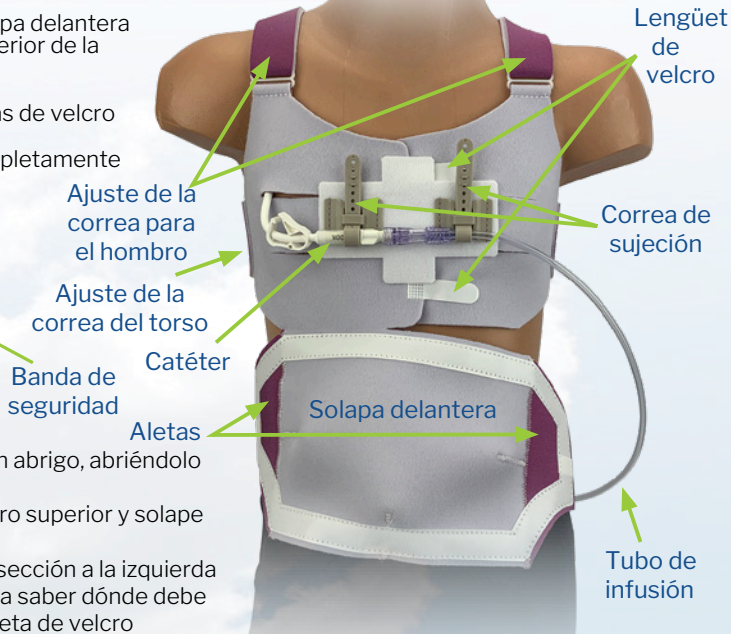



PASO 1

- Abra completamente la solapa delantera
- Abra el velcro en la parte inferior de la solapa
- Quite la banda de seguridad
- Abra cada una de las 2-3 tiras de velcro del interior de la solapa
- El chaleco estará ahora completamente abierto como un abrigo

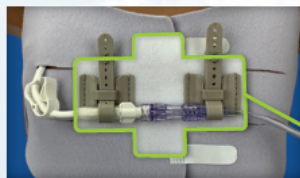

PASO 2

- Póngase el chaleco como un abrigo, abriéndolo por delante
- Abroche la lengüeta de velcro superior y solape ligeramente las secciones
- El pequeño orificio en cada sección a la izquierda del niño sirve como guía para saber dónde debe estar el extremo de la lengüeta de velcro

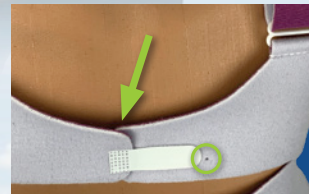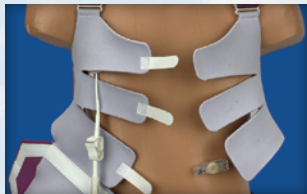

PASO 3

- Determine cuál es el mejor lugar para que el catéter central ingrese al chaleco
- Introduzca el catéter en la parte delantera del chaleco
- Cierre las tiras de velcro restantes
- Recuerde solapar ligeramente las secciones en el centro





PASO 4

- Ajuste las correas de velcro **UNIFORMEMENTE** a ambos lados del torso
- El chaleco debe quedar ajustado
- Ajuste las correas de velcro en ambos hombros
- Las correas deben estar ajustadas



PASO 5


- El chaleco puede colocarse más arriba (A) o más abajo (B) en el cuerpo para adaptarse al lugar de salida del catéter
- Alargue o acorte las correas para el hombro para una posición óptima

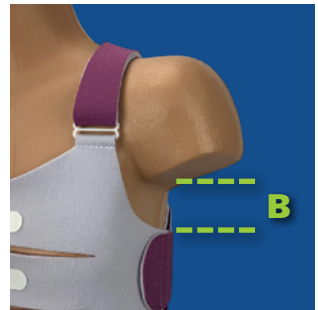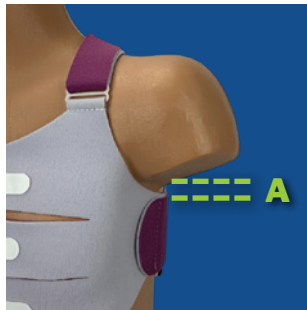

PASO 6

- Coloque la banda de seguridad en la parte delantera del chaleco
- La banda de seguridad **DEBE SOLAPAR** todas las secciones para unir las
- **PRESIONE FIRMEMENTE** para sujetar completamente el velcro a lo largo de la banda de seguridad

PRESIONE FIRMEMENTE
¡La banda de seguridad debe estar totalmente adherida al chaleco para evitar daños en el catéter!


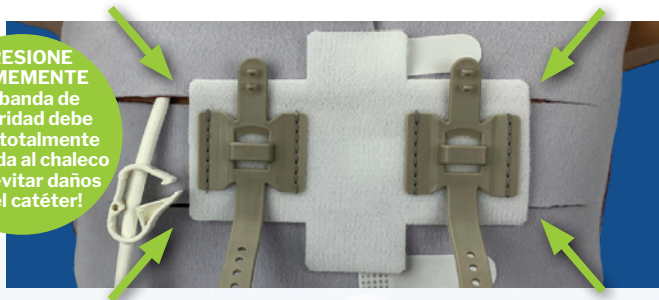


Utilice la banda de seguridad para unir todas las secciones.

¡No coloque la banda de seguridad directamente contra la vía central!

PASO 7


- Asegure la vía central con la correa de sujeción más cercana
- Pase el extremo de la correa de sujeción por debajo del lazo y por el otro lado
- La correa de sujeción debe estar ajustada pero no demasiado apretada
- Coloque su dedo por encima y por debajo de la lengüeta
- Presione hacia abajo la correa de sujeción para fijarla en ambas bases

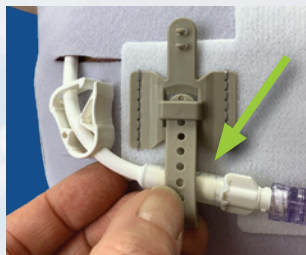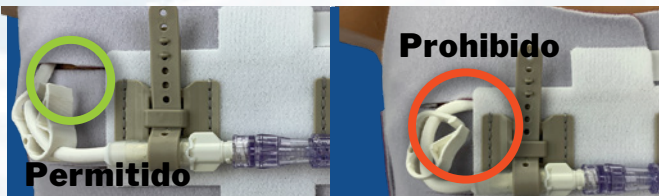

PASO 8

Para catéter **DOBLE LUMEN**:

- Sujete ambos lúmenes juntos utilizando 1 correa.

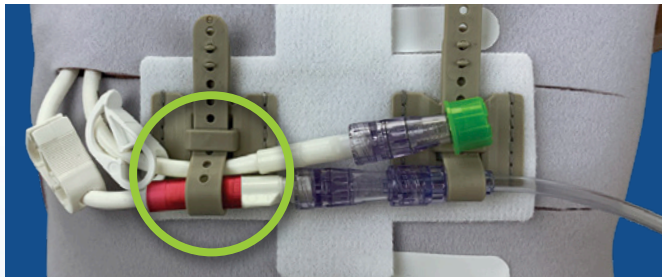

PASO 9

Si la banda de seguridad no se encuentra en una ubicación ideal, puede moverse con cuidado:


- ¡**ADVERTENCIA! SEPARA** el catéter de la correa antes de moverlo!
- Desprenda la banda de seguridad hacia arriba de derecha a izquierda **DEL NIÑO**
- Recuerde solapar todas las secciones delanteras con la banda de seguridad
- La banda de seguridad puede colocarse como se indica a continuación:



PASO 10


- Conecte el tubo de infusión al catéter según sea necesario
- Sujete el tubo de infusión con la segunda correa de sujeción
- Ajuste la correa de sujeción al tubo
- Ajuste el tubo **LUEGO** de la conexión a la vía central
- El tope debe estar **ENTRE** las 2 correas de sujeción

Continúa en el reverso

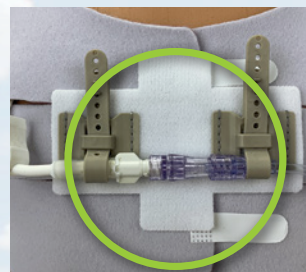

PASO 11

- Compruebe la seguridad de la instalación
- Jale SUAVEMENTE del tubo de infusión
- La banda de seguridad debe permanecer totalmente adherida al chaleco
- No debe haber NINGUNA TENSIÓN en el catéter central
- Ajuste según sea necesario para conseguirlo

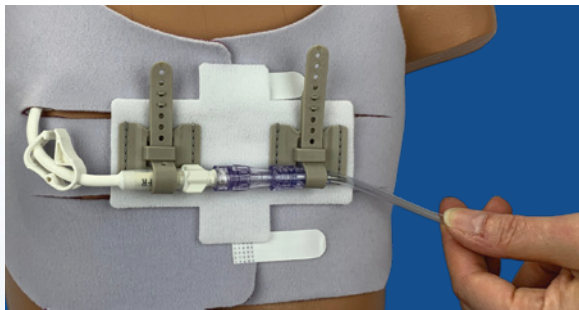

PASO 12

- La solapa delantera tiene una **FORMA REDONDEADA**
- Acomoda múltiples lúmenes/tubos sin comprimir contra el pecho
- Para cerrar la solapa delantera:
 - Adhiera el velcro en la parte inferior de la solapa
 - **MANTENIENDO LA FORMA REDONDEADA**, adhiera el velcro en la parte superior del chaleco
 - Todos los velcros deben estar en contacto con el chaleco, no con el pecho




PASO 13

- Alise las alas cerradas a cada lado de la solapa
- En caso de infusión, el tubo puede salir por cualquier parte de la solapa delantera
- Las correas del torso pueden extenderse sobre las alas si es necesario

OPCIONAL:

- Lleve el tubo por la espalda
- Utilice una banda de seguridad individual adicional para ajustar

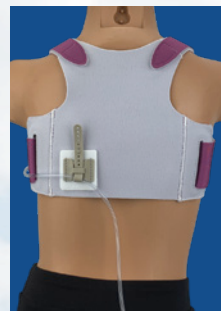

PASO 14

Para comprobar el lugar de salida, no se quite el chaleco:

O BIEN - Abra una correa y tire hacia abajo de la parte superior del chaleco para ver la zona de salida

O - Abra una correa del torso y levante el lado del chaleco para ver la zona



Para quitarse el chaleco durante la infusión:

- Abra la solapa delantera
- Separe el catéter de la banda de seguridad
- Quite la banda de seguridad
- Abra todas las tiras de velcro y el velcro inferior de la solapa delantera
- Quítese el chaleco, teniendo cuidado con el catéter central
- Sustituya por un chaleco limpio
- Cierre el chaleco y asegure el catéter, con normalidad

Instrucciones de lavado

- ¡Cierre todos los velcros antes de lavar!
- Lavado a máquina suave o a mano
- Agua fría
- Colgar en seco
- NO secar en secadora



USO EN UN
SOLO PACIENTE

**RADIOGRAFIA
SEGURA**

Este producto NO
CONTIENE METAL

SIN LÁTEX

Este producto NO
CONTIENE LÁTEX



GUS GEAR®

BREAK FREE!®

Visite GusGear.com para
conocer nuestra línea
completa de productos.

© 2023 Gus Gear Inc.
Patente en trámite. Todos los
derechos reservados.