


GUS&GEAR®

LOCK 3000 Instrucciones del cinturón



PASO 1:

- Abra por completo los broches y el velcro de la solapa delantera, incluyendo el broche cercano a la abertura circular.

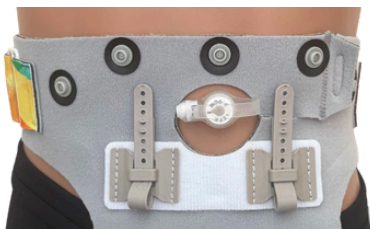

- Inserte el cinturón en un lado de la hebilla, con el velcro hacia afuera.
- Pliegue para asegurar con la tira de velcro.



- Coloque la abertura circular alrededor del tubo G u otro dispositivo.
- Pase todos los tubos por la abertura y centre el dispositivo en la abertura.
- Pase el segundo extremo del cinturón por la parte posterior y páselo por el otro tri-glide. Cierre la lengüeta de velcro si se ha abierto.



- Coloque la tira Dual Safe Strip directamente debajo de la abertura circular y presione firmemente para fijarla.




- Ajuste cualquiera de los extremos del cinturón para obtener más comodidad y asegurar el velcro. Al ajustar ambos extremos del cinturón, los cierres de velcro pueden quedar accesibles u ocultos.



- Si usa una sonda de alimentación de bajo perfil (botón) con el juego de extensión desconectado, continúe con el Paso 3.

PASO 2:

- Asegure el juego de extensión o el catéter peritoneal enrollando la sonda como se muestra.
- Ubique el conector entre las dos correas en la Banda de Seguridad Doble.
- Use una correa para asegurar el dispositivo y la otra para asegurar la sonda.
- Inserte la sonda en la dirección deseada para que salga de la solapa delantera.

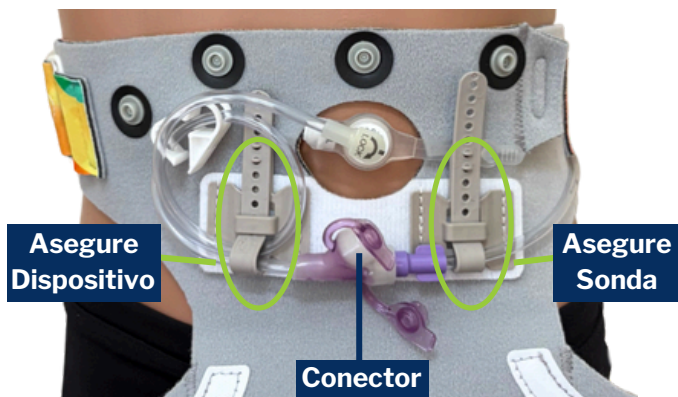

PASO 3:

- Cierre la solapa delantera con los broches y el velcro.



- Opcional: Asegure la sonda al cinturón usando una Banda de Seguridad Individual. (No incluida; se puede comprar de forma individual en gusgear.com.)



INSTRUCCIONES DE LAVADO

Cierre todos los velcros antes de lavar.

Lavado suave a máquina o a mano.

Agua fría. Secar sólo colgando.



IFU (Instrucciones de uso disponibles) en GusGear.com


GUS GEAR®

